

# アルコール呼気チェッカー(家庭用)

型番 ALCHOL-BLOW

## 特徴

### 呼気中のアルコール濃度を簡単にチェックします

使用前にお読み下さい。



#### 使用上のご注意。

- ・ご使用前には「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電池を抜いて製品サポート又は販売店までご連絡下さい。
- ・飲酒運転は道路交通法で禁止されています。本機器の表示値で運転の可否を判断しないでください。
- ・表示値は目安です。
- ・吸入口を口腔内に入れないで下さい。
- ・本機器は日本国内専用です。保証は国内に限り有効です。




#### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・本機器は防水仕様ではありません。

## 1. 準備


- 1) 電池蓋を外し、単4型乾電池(別売)を2本入れて下さい。(極性を間違わないように注意してください。)
- 2) 吸入口を装着ください。吸入口は左に回すと外れます。

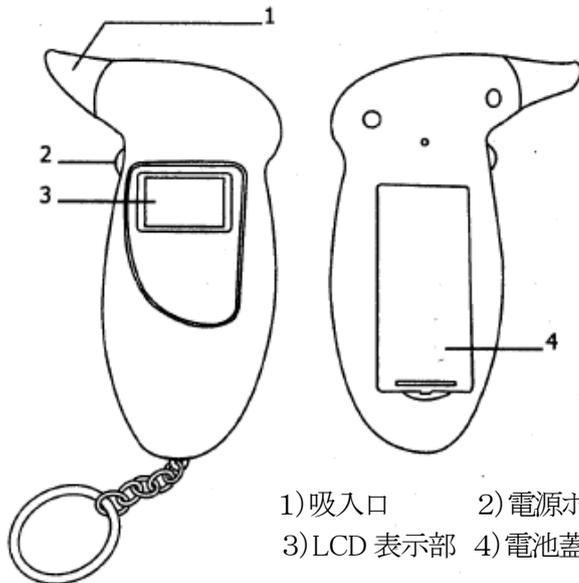


- 1) 吸入口      2) 電源ボタン  
3) LCD 表示部      4) 電池蓋

## 2. 計測

1. 電源スイッチを長押しします。“Warm up”と約10秒間表示し準備を行います。

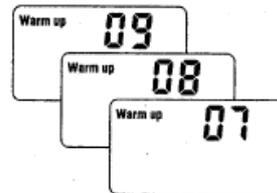

2. “Blow”と表示し10秒カウントダウンが始まったら、その間に呼気を吹き込んでください。

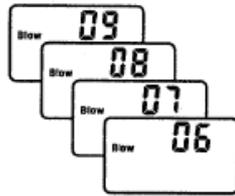

### <注意>

- チェックの前に水で口をすすいでください。
- 吸入口から1cm程度離して呼気を吹き込んでください。
- 呼気は3～6秒程度吹き込んでください。
- 正確にチェックするために2～3回測定ください。
- 飲酒直後のアルコール分は呼気での反応が少なくなります。
- 呼気のはきだし方や個々の違いにより計測値が変わります。
- 表示値は目安です。表示値に対する法的保証は一切ありません。

### <表示値の見方>

表示は“BAC”血液中アルコール濃度“で表示されます。  
呼気中アルコール濃度“BrAC”は下記の換算表を使用下さい。

BAC(機器表示値)		BrAC
%	g/L	mg/L
0.01	0.1	0.05
0.02	0.2	0.10
0.03	0.3	0.15
0.04	0.4	0.20
0.05	0.5	0.25
0.06	0.6	0.30

(参考)

- 酒気帯び運転(違反点数13点)・・・BrAC 0.15mg/L 以上  
酒気帯び運転(違反点数25点)・・・BrAC 0.25mg/L 以上

### 3. 仕様 仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、吸入口(取替用吸入口4個)、取扱説明書(本紙)

電源	単4型乾電池 2個(別売)	準備時間	10秒
表示範囲	0.00 ～ 0.19%(BAC)	吹込み時間	10秒以内
サイズ	約56g、118×70×28mm	材質	ABS

### 4 サポート

保証書		
型番:ALCHOL-BLOW	お買い上げ日	年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印	
保証期間:お買い上げ日より半年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 千590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA