


ご使用方法

充電方法 ※ご使用前にバッテリーを充電してください。

1. 充電用ケーブルの2つある接続口の片方にバッテリーを接続してください。


同時に2つのバッテリーを充電しないでください

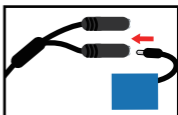

2. 充電ケーブルのUSBを電源アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。


電源アダプターのランプ

● 赤…充電中 ● 緑…充電完了

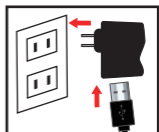


装着方法

1. 膝を軽く曲げ、サポーターを当てる

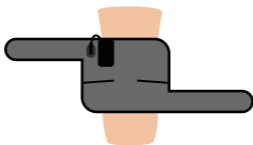

2. サポーターの両端を膝の上下に巻きつけるように固定

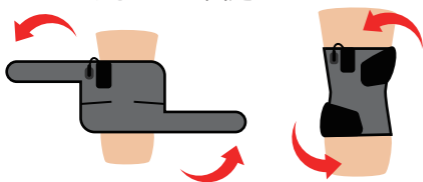

発熱 ON/OFF

ポケットに入っているバッテリーの接続口をサポーターのジャックに接続してください。

※接続すると発熱し、抜くとOFFになります。

