

LEDスコープ付耳かき

型番：EAR-SCOPE

特徴

耳の中を見ながら耳かきできます

機能

マイクロスコープで耳の中を見ることができ、耳かきを装着すれば見ながら耳かきができます。
先端は直径6.5mmと細いためお子様の耳でも使用できます。

使用する前にお読み下さい。

⚠ 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。

⊘ 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。
- ・耳の中に無理に差し込まないで下さい。
- ・水中では使用しないで下さい。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

<型番と対応機器>

EAR-SCOPE ・ USBを直接接続することにより、Windows PC、アンドロイド端末(スマホ/タブレット)
(アンドロイド4.4以上、OTG、UVC機能必要)で使用できます。

1. 組立方法

1) スコープとして使用する場合

そのまま(耳かき用アタッチメントを外して)使用します。

2) 耳かきとして使用する場合

付属のアタッチメントを先端につけて
右の様に組み立てて使用します。



2. 接続方法

- ・3種のUSBコネクタが内蔵されているので、接続機器に合わせて差し込みます。
- ・接続すると先端のLEDが点灯します。



TYPE-A



MICRO-B



TYPE-C

3. アプリ (直接接続方法)

スコープ画面をキャプチャーするアプリをインストールします。

使用アプリはサポート用ホームページからダウンロードしてください。

<サポート用ホームページ>

<http://www.broadwatch.jp/support/download.html>



PC用アプリ

ダウンロードページの

「アプリカメラ」>「医療・接写カメラ」の「EAR-SCOPE」>「PC用 映像再生アプリダウンロード (EXE)」をクリックしてインストールします。

■使用方法概要

- ① メニュー「Devices」を開き「USB2.0 Device」を選択する。
- ② メニュー「Options」を開き「Preview」を選択する。
※「Devices」で表示される名称は機器により異なります。
- ③ スコープ画面が表示されます。

Android アプリ

ダウンロードページの

「アプリカメラ」>「医療・接写カメラ」の「EAR-SCOPE」>「Android 端末用 映像再生アプリダウンロード (APK)」をクリックしてインストールします。

あるいは、Google Play ストアから、USB カメラ用のアプリ(例えば CAMERAFI)を検索してインストールをお勧めします。

4. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、耳かきアタッチメント(耳かき、ソフトカバー)、取扱説明書(本紙)

解像度	30万画素(640×480)	撮影角	60°
LED	6個	拡大率	約10倍
USBプラグ	TYPE-A、TYPE-C、MICRO-B	防水	IP67
本体サイズ	160×8φ(先端部 6.5φ)mm、約52g(ケーブル含む)		

5 サポート

保証書

型番:EAR-SCOPE

お買い上げ日

年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間：お買い上げ日より半年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA