

【エネヒート】ヒーター付腰サポータ(充電器、充電電池セット)



使用上の注意。

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに使用を中止し製品サポートまたは販売元まで連絡下さい。
- ・ 長時間の使用による低温やけどにご注意下さい。熱いと感じた場合は使用を中止下さい。
- ・ PSEバッテリーはサポータにしっかり装着ください。
- ・ PSEバッテリーについてはPSEバッテリーの注意事項をお読みください。
- ・ 改造、分解等はやしないで下さい。
- ・ 糖尿病など血行に問題がある方、肌が熱に弱い方などは本製品を使用しないで下さい。
- ・ 就寝中に使用しないで下さい。
- ・ 機器は折り曲げないで下さい。
- ・ 充電電池については該当製品の説明書をお読みください。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・ 車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・ 湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

特徴

- ・ CNT(カーボンナノチューブ)布ヒーター使用で柔らかく安全です。
- ・ 充電電池はモバイルバッテリーとしても利用できます。
- ・ 充電電池用ポケットにより充電電池をホールドします。


使用方法

<充電>

充電電池をUSB充電器で充電ください。

<使用>

ベルトを腰に装着して充電電池にUSBケーブルを接続すると、中央部が暖かくなります。
OFFにするときはUSBケーブルを抜いてください。

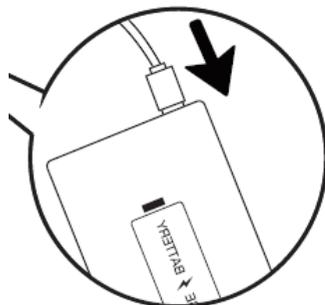

<洗濯>

充電電池とベルトに内蔵されたヒーターを取り出すと洗濯が可能です。

仕様 (仕様は予告なく変更する場合があります)

材質	(表地) ナイロン85%、ポリウレタン15% (裏地) ポリエステル85%、ポリウレタン15%		
電源定格	USB電源 DC5V/1.0A		
出力	約4W	連続使用時間	約4時間
ヒーター	カーボンナノチューブ布ヒーター		
充電電池	BATBANK-PSE4仕様参照		
適応サイズ	ウエスト55～100cm相当		
サイズ	約 幅17cm、全長110cm、重量約130g		

<同梱品>

本体セット、充電電池 (BATBANK-PSE4)、USB電源 (5V/1A) 本説明書

サポート

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

ENE-HEAT-WAIST
Made in China