多《多《蓝色上版》

強力バネが膝の動きをアシスト

屈伸動作、階段、登山などに






ご使用前には「安全・使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全・使用上のご注意

- ◎装着部に傷、痛み、しびれ、湿疹などの異常がある場合は、医療従事者の指示に従ってください。 ◎破損や変形した製品は使用しないでください。 ◎膝以外の部位に使用しないでください。
- ◎就寝時に使用しないでください。 ◎長時間のご使用は皮膚障害や血行障害を起こすおそれがあります。 ◎ばね部分に指を挟まないようご注意ください。
- ◎サポーターはきつく締めすぎないでください。また、緩みやずれがないように確実に装着してください。適宜装着を確認し、やり直し等を行ってください。
- ◎本製品の使用中に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医療従事者にご相談ください。 ◎ご自身の身体の状態に合わせて無理なくご使用ください。
- ◎装着は手順に沿って正しく装着してください。 ◎上下、裏表を正しく装着してください。 ◎無理な力をかけるような動作は行わないでください。
- ◎面ファスナーを使用しています。皮膚を傷つけたり衣類に引っかけたりしないようご注意ください。 ◎洗濯はできません。汚れた場合は濡らして固く絞った布などで拭いてください。

着用方法

①膝裏に本製品を当てます。

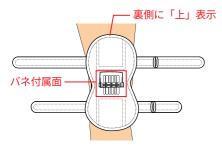


- バネ付属面が外側です。
- ・「上」表示部分が太もも側です。


②装着ベルトの穴の開いた部分に、 反対側にベルトを挿入します。



③装着ベルトの両端の面ファスナー (左右2箇所)を開きます。

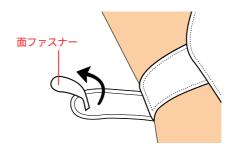

④装着ベルトを引っ張りながら 固定します。

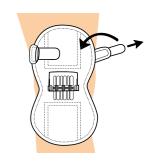

※下側の装着ベルトも同じ手順で装着してください。

製品仕様

材 質 ポリエステル、スチール、ABS サイズ 約 29×15cm(ベルト除く) 約 185g

<セット内容>

本体×2 (両膝分)、取扱説明書(本紙)

サポート

保証期間:お買い上げ日より半年

世番: RAKU-TATI お買い上げ日 年 月 日 で購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。 保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください

ホームページ http://www.broadwatch.jp/

メール support@broadwatch.jp

電 話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。





