

# いびき改善用送風機

型番: SNORE-TRAIN

## 特徴

◎寝ているときに鼻の穴へわずかな空気を送っていびきの低減を期待します。(充電式、電動式)

<医療機器ではありません>

## 安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

- ・ ご使用前のご使用の後に、鼻プラグをお湯などできれいに洗って乾かしてからご使用ください。
- ・ 万一、体調がおかしくなったり、皮膚に異変があったりした場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・ 破損や変形した製品は使用しないで下さい。
- ・ 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- ・ 火のそばでの保管・使用はしないでください。
- ・ 高温多湿の場所での保管・使用はしないでください。
- ・ 廃棄は自治体の廃棄物処理に従ってください。
- ・ 取扱説明書は必ず保管してください。

## 1. 各部の名称




## 2. 使用方法

### <充電>

充電をしてからご使用下さい。

充電口に付属の充電ケーブルを接続して、USB 電源(別売)から充電します。

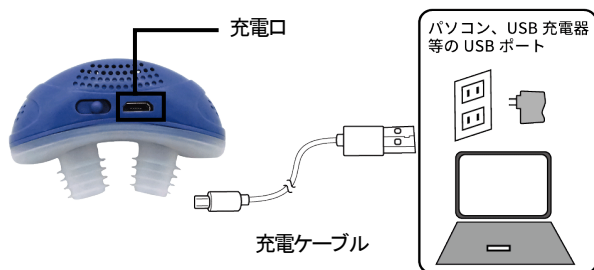

## <使い方>

- 1)電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。
- 2)鼻プラグを鼻の穴に入れます。
- 3)就寝時に鼻腔の空気を循環させます。

## <使用上の注意>

鼻プラグは確実に鼻に挿入して、正しくご使用ください。

### 3. 仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

方式	電動、充電式
材質	ABS(本体)、シリコン(鼻プラグ)
大きさ、質量	約 60 x 25 x 39mm、約 15g

同梱品:本体、シリコン製鼻栓プラグ(本体に装着して出荷)、充電ケーブル、取扱説明書(本紙)  
医療機器ではありません

### 4. サポート

#### 保証書

型番:SNORE-TRAIN

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間:お買い上げ日より半年

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7